

## CARPOFIX MANU

Orteză de încheietura mâinii mână fixă

Ref. SRT 203

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

#### Mărimi disponibile în variantele stânga și dreapta

Mărimi	1	2	3	4	5
Circumferința încheieturii mâinii (cm)	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
Referință	SRT203M1	SRT203M2	SRT203M3	SRT203M4	SRT203M5

După codul produsului trebuie adăugat L pentru Stânga, R pentru Dreapta

Se măsoară circumferința încheieturii mâinii

#### Indicații

Se utilizează în entorse, luxații, artroze, sindrom de tunel carpian, paralizia nervului radial, tenosinovite, fracturi la nivelul zonei, atât ca tratament ortopedic cât și postoperator.

#### Descriere

Orteză realizată din material textil, prevăzută cu:

- o atelă metalică palmară ce se poate modela
- 2 atele din material plastic încorporate, pe partea dorsală a mâinii.

Închiderea se face cu scai, pe partea dorsală a mâinii.

Lungime: 24 cm.

Orteza stabilizează și imobilizează articulația radiocarpiană.

#### Compoziție

Orteza este confecționată dintr-un ansamblu cașerat format din 3 straturi:

- **Asterix** - firul de poliamidă din compoziție are o rezistență mare la agenți chimici și biologici, rezistă la abraziune și nu absoarbe apa.
- **Moltopren (MTP)** - spumă poliuretanică cu celule deschise, permeabilă la aer (fluxul de aer în ambele sensuri este invers

proporțional cu densitatea spumei) și foarte mare absorbantă de umiditate.

- **Jersey cotone SOFT** - țesătură de bumbac 100% sau bumbac cu spandex - elasthan (pentru creșterea elasticității).

#### SOFT

Codificarea tratamentului balsamic al țesăturii din bumbac pentru a-i asigura moliciune la atingere și pentru a evita iritarea pielii.

#### Poziționare

Se așează orteza astfel încât atela metalică să sprijine palma. Orteza se închide pe partea dorsală a antebrațului, trecând benzile de fixare prin cele 3 cataramă. Se reglează la nivelul optim de compresie.

#### Curățare



Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

#### Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

**Garanția legală de conformitate** conform Legii nr. 449/2003: **2 ani.**

**Garanția comercială a produsului: 30 zile.**

**Data producției:** vezi eticheta ambalaj.

**Data valabilității:** fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, indicate pe cutia de ambalare a produsului.

**Termen de comunicare a soluționării:** 15 zile.

Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: [suportclienti@triamed.ro](mailto:suportclienti@triamed.ro)

<b>TALON DE GARANȚIE</b>	Lotul și data fabricației:
30 zile de la data cumpărării produsului	
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului



**Producător: TRIAMED SRL**

România/Timiș/Timișoara, Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A  
Tel/Fax: 00 40 256 487388, Tel: 00 40 765 240037

[office@triamed.ro](mailto:office@triamed.ro), [triamed@gmail.ro](mailto:triamed@gmail.ro)

[www.triamed.ro](http://www.triamed.ro)