

## TLS FIX

Corset toraco lombo sacral

Ref. SRT 138



### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

#### Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6
Circumferința taliei (cm)	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125
Înălțimea corsetului în zona posterioară (cm)	48	49	50	51	52	53
Referință	SRT138M1	SRT138M2	SRT138M3	SRT138M4	SRT138M5	SRT138M6

Se măsoară circumferința taliei

#### Indicații

Se utilizează în caz de hernii de disc incipiente, lombalgii, post intervenții chirurgicale, în caz de osteoporoză, pentru susținerea coloanei toracolombosacrale.

#### Descriere

Este realizat din material textil elastic (componenta posterioară) și material textil rigid (componenta anterioară), prevăzut cu:

- 2 atele metalice drepte situate pe componenta posterioară, pentru susținerea zonei lombare
- 2 atele metalice S-FORM situate paravertebral, pentru susținerea zonei toracolombare
- 2 atele din material plastic situate pe componenta anterioară, pentru susținerea zonei abdominale
- 2 benzi elastice de 5 cm, situate în jurul taliei, care asigură stabilitate și compresie. Benzile elastice se continuă în partea anterioară cu benzi rigide, reglabile prin tăiere și re poziționarea scaiului tip "crocodil". Astfel, ansamblul benzilor elastice din jurul taliei are posibilitatea de reglare a compresiei.
- 2 benzi elastice ce cuprind umerii și sunt fixate pe torace. Benzile sunt prevăzute cu manșoane pentru protecție axilară.

Închiderea se face anterior cu scai.

Lățime: anterior - 16 cm, posterior - înălțimea corsetului variază între 48 - 53 cm, în funcție de mărime.

Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.

Cele 4 atele metalice și cele 2 atele din material plastic stabilizează regiunea toracolombară reducând ușor lordoza și cifoza, iar compresia pe care o exercită benzile elastice stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și durerea. Cele 2 benzi elastice care cuprind umerii și sunt fixate pe torace, corectează prin tracțiune poziția trunchiului.

#### Compoziție

Material textil elastic: poliester - 50%, poliamidă - 33%, elastan - 17%. Material rigid: poliamidă - 100%.

#### Poziționare

Lombostatul se va aplica din spate spre față, partea lată se fixează pe regiunea lombară, partea îngustă se va închide anterior, pe abdomen. Cele 2 benzi lungi se petrec în jurul umerilor, se încrucișează la spate și se fixează anterior, pe torace. Cele două benzi elastice se fixează în jurul taliei iar benzile rigide se taie la lungimea dorită. Scaiul tip "crocodil" se re poziționează pe fiecare bandă și se închide anterior. Pentru o aplicare corectă, partea lombară este perfect întinsă, fără cute.

#### Curățare



Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

#### Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

**Garanția legală de conformitate** conform Legii nr. 449/2003: **2 ani.**

**Garanția comercială a produsului:** **30 zile.**

**Data producției:** vezi eticheta ambalaj.

**Data valabilității:** fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, indicate pe cutia de ambalare a produsului.

**Termen de comunicare a soluționării:** 15 zile.

Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: [suportclienti@triamed.ro](mailto:suportclienti@triamed.ro)

<b>TALON DE GARANȚIE</b> 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului



**Producător: TRIAMED SRL**

România/Timiș/Timișoara, Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A  
Tel/Fax: 00 40 256 487388, Tel: 00 40 765 240037

[office@triamed.ro](mailto:office@triamed.ro), [triamed@gmail.com](mailto:triamed@gmail.com)

[www.triamed.ro](http://www.triamed.ro)