

TRIAMED

AKTIV

Orteză de genunchi mobilă cu suport patelar și articulații laterale

Ref. SRT 304

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6	7	8
Circumferința genunchiului (cm)	33-35	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47	47-49
Referință	SRT304M1	SRT304M2	SRT304M3	SRT304M4	SRT304M5	SRT304M6	SRT304M7	SRT304M8

Se măsoară circumferința genunchiului la mijlocul rotulei

Indicații

Se utilizează în caz de instabilitate laterală a articulației genunchiului, traumatisme sau afecțiuni la nivelul genunchiului, procese inflamatorii, pentru reabilitare postchirurgicală.

Descriere

Orteză tip manșon, realizată din material textil, prevăzută cu:

- 2 atele metalice cu articulație mobilă, câte una pe fiecare parte
- 2 benzi de fixare, cu scai elastic. Scaiul elastic se mulează pe anatomia conică a coapsei, împiedicând alunecarea ortezei
- suport patelar (spumă polietilenă).

Lungime: 32 cm.

Orteza este un suport pentru articulația genunchiului, cele două articulații laterale policentrice asigurând stabilitate și siguranță la utilizare.

Datorită formei sale tubulare, tip manșon, nu se recomandă a fi utilizată în cazul unui genunchi cu edem și tumefacție majoră.


Compoziție

Neopren acoperit pe ambele părți cu material textil, poliester 100%.

Poziționare

Se așează orteza pe picior astfel încât suportul patelar să înconjoare rotula iar atelele metalice să fie paralele cu axul median al piciorului iar articulațiile acestora să corespundă articulației genunchiului. Cele 2 benzi cu scai se trec prin catarama și se reglează la nivelul optim de compresie.

Curățare

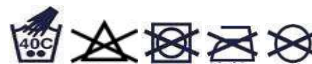

Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: **2 ani.**

Garanția comercială a produsului: 30 zile.

Data producției: vezi eticheta ambalaj.

Data valabilității: fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, indicate pe cutia de ambalare a produsului.

Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.

Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro

TALON DE GARANȚIE 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului



Producător: TRIAMED SRL

România/Timiș/Timișoara, Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A
Tel/Fax: 00 40 256 487388, Tel: 00 40 765 240037

office@triamed.ro, triamed@gmail.ro

www.triamed.ro