

TRIAMED

CADRU DE MERS

Cod: TRM 06

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Indicații

Se utilizează în caz de instabilitate în timpul mersului sau la necesitatea descărcării parțiale sau totale a unui membru. Este interzisă supraîncărcarea cadrului, acest lucru putând duce la îndoire sau rupere. În cazul uzurii amortizoarelor, acestea vor fi înlocuite, pentru a evita alunecarea.

Descriere

Cadrul este realizat din:

- țeavă din aluminiu vopsită electrostatic (22 mm)
- țeavă din aluminiu vopsită electrostatic (18 mm).

Este prevăzut cu:

- 2 mânere din spumă poliuretanică
- 4 amortizoare din PVC pentru prevenirea alunecării (diametru interior 18 mm).

Lățime: 64 cm.

Înălțime reglabilă (83-93 cm).

Sarcina maximă admisă: 100 kg.

Greutate netă: 1400 g.

Culoare disponibilă: gri.

Curățare

Se șterge cu material textil, cu apă și detergent.

Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

TALON DE GARANȚIE 6 luni de la data cumpărării produsului.	
Codul produsului	
Data cumpărării	
Semnătura și ștampila vânzătorului	

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Producător: TRIAMED SRL

Sediul social

Comuna Sacoșu Turcesc, sat Uliuc, nr.262 C, Timiș / România

Tel/Fax: 00 40 256 487388

office@triamed.ro

www.triamed.ro

Producție

Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A, Timișoara /Timiș/ România

Tel: 00 40 765 240037

triamed@gmail.ro

