

TRIAMED

Cârjă cu sprijin subaxilar
Ref: TRM 04

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Indicații

Se utilizează în caz de instabilitate în timpul mersului sau la necesitatea descărcării parțiale sau totale a unui membru. Este interzisă supraîncărcarea cârjei, acest lucru putând duce la îndoire sau rupere. În cazul uzurii amortizorului, acesta va fi înlocuit, pentru a evita alunecarea.

Descriere

Cârja este realizată din:

- țeavă din aluminiu eloxat (22 mm)
- țeavă din aluminiu eloxat (18 mm). Este prevăzută cu:
- mâner din polietilenă, căptușit cu spumă poliuretanică
- amortizor din PVC pentru prevenirea alunecării (diametru interior 22 mm).

Înălțime reglabilă (95-155 cm).

Se ajustează în trepte de 2,5 cm.

Sarcina maximă admisă: 100 kg.

Greutate netă: 700 – 900 g.

Culoare disponibilă: gri.

Curățare

Se șterge cu material textil, cu apă și detergent.

Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: **2 ani**.

Garanția comercială a produsului: 6 luni.

Data producției: vezi eticheta produs.

Data valabilității: fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, indicate pe eticheta produsului.

Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.

Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro

TALON DE GARANȚIE	Lotul și data fabricației:
6 luni de la data cumpărării produsului	
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului

Fabricat în R.P.Chineză

Importator: TRIAMED SRL

România/Timiș/Timișoara, Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A

Tel/Fax: 00 40 256 487388, Tel: 00 40 765 240037

office@triamed.ro, triamed@gmail.ro

www.triamed.ro