

TRIAMED

THORATEX 03

Orteză toracică elastică

Ref. SRT 114

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6
Circumferința toracelui (cm)	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135
Referință	SRT114M1	SRT114M2	SRT114M3	SRT114M4	SRT114M5	SRT114M6

Se măsoară circumferința toracelui

Indicații

Se utilizează pentru corectarea pozițiilor vicioase ale coloanei toracale, în caz de cifoză.

Descriere

Este realizată din material textil elastic, prevăzută cu:

- 2 atele paravertebrale din material plastic pentru susținere
- 2 benzi elastice care cuprind umerii și sunt fixate pe torace, corectând prin tracțiune poziția trunchiului. Benzile sunt prevăzute cu manșoane pentru protecție axilară.

Închiderea se face anterior cu scai.

Compoziție

Material textil elastic: poliester - 50%, poliamidă - 33%, elastan - 17%.

Poziționare

Se poziționează orteza pe segmentul dorsal al coloanei vertebrale și cele 2 benzi scurte se fixează anterior, pe torace. Se petrec cele 2 benzi lungi în jurul umerilor, se încrucișează la spate și se fixează anterior, pe torace.

Curățare



Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: **2 ani.**

Garanția comercială a produsului: 30 zile.

Data producției: vezi eticheta ambalaj.

Data valabilității: fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, indicate pe cutia de ambalare a produsului.

Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.

Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro

TALON DE GARANȚIE 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului



Producător: TRIAMED SRL

România/Timiș/Timișoara, Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A

Tel/Fax: 00 40 256 487388, Tel: 00 40 765 240037

office@triamed.ro, triamed@gmail.ro

www.triamed.ro