

## TLS 01

Corset toraco lombo sacral

Ref. SRT 117

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed!

Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din materiale PREMIUM, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Produsele Triamed sunt înregistrate la Ministerul Sănătății și sunt conforme cu Specificația tehnică și cu cerințele Regulamentului (UE) MDR 2017/745 al Parlamentului European privind dispozitivele medicale și respectă cerințele prevăzute în Anexa I – Cerințe generale privind siguranța și performanța- și Anexa VIII – Reguli de clasificare. Conformitatea este declarată în baza Articolului 52(7), Anexa II și Anexa III din MDR 2017/745.

### Atenție!

Orteza se folosește conform recomandărilor medicului specialist!

Alegerea mărimii - Pentru rezultate optime, mărimea potrivită va fi selectată pe baza tabelului de măsurători de mai jos. O mărime prea mică poate duce la intoleranță la purtare sau la deteriorarea produsului! O dimensiune prea mare scade semnificativ eficacitatea ortezei.

Această orteză trebuie aplicată numai în conformitate cu instrucțiunile menționate aici.

Produsul este destinat utilizării de către un singur pacient.

### Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6
Circumferința taliei (cm)	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125
Înălțimea corsetului în zona posterioară (cm)	48	49	50	51	52	53
Referință	SRT117M1	SRT117M2	SRT117M3	SRT117M4	SRT117M5	SRT117M6

Se măsoară circumferința taliei

### Indicații

Se utilizează în caz de hernii de disc, lombalgii, post intervenții chirurgicale, osteoporoză, susținerea coloanei toracolombosacrale.

### Descriere

Este realizat din material textil elastic, prevăzut cu:

- 2 atele laterale din material plastic situate pe componenta posterioară, pentru susținerea zonei lombare
- 2 atele paravertebrale din material plastic, situate pe componenta posterioară, pentru susținerea zonei toracolombosacrale
- 2 atele din material plastic situate pe componenta anterioară, pentru susținerea zonei abdominale
- 2 benzi elastice care asigură compresie sporită la nivel lombar
- 2 benzi care înconjoară umerii, corectând prin tracțiune poziția trunchiului. Benzile au o componentă elastică și una rigidă, se poziționează peste capul humerusului, sunt reglabile prin tăiere și sunt prevăzute cu un ghidaj posterior pentru prevenirea alunecării lor în axilă. Închiderea benzilor se face anterior pe zona abdominală, pe corset.

Pentru scurtarea benzilor, se îndepărtează scaiul tip "crocodil" de pe extremități, se taie banda la lungimea optimă și se re poziționează scaiul.

Închiderea se face anterior cu scai.

Lățime - anterior 16 cm, posterior - înălțimea corsetului variază între 48 – 53 cm, în funcție de mărime.

Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutoare.

Cele 2 atele laterale și cele 2 atele paravertebrale lungi stabilizează regiunea toracolombară reducând ușor lordoza și cifoza, iar compresia pe care o exercită benzile elastice stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și durerea.

Este un corset tradițional elastic care, datorită materialului, permite o respirație toracoabdominală normală, asigurând în același timp o compresie uniformă pe toată suprafața acoperită.

### Scopul

Corsetul stabilizează regiunea toracolombosacrală, reducând ușor lordoza și cifoza, compresia pe care o exercită benzile elastice stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și durerea.

### Compoziție

Material textil elastic cu o structură a țesăturii ce permite o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri.

Material textil cașerat. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.

### Poziționare


Corsetul se aplică din spate spre față, partea lată se fixează pe regiunea lombară, partea îngustă se va închide anterior, pe abdomen. Cele 2 benzi lungi se petrec în jurul umerilor, se încrucșează la spate și se fixează anterior pe zona abdominală, pe corset. Pentru o aplicare corectă, partea lombară este perfect întinsă, fără cute. Dacă este necesară ajustarea poziției corsetului, ajustarea se face prin deschiderea completă a scaiului și re poziționarea corsetului mai sus sau mai jos pe segmentul de corp, în funcție de necesitate. **Pentru a evita destrămarea materialului, nu se trage de corsetul fixat.**

### Curățare



Se spală manual cu apă caldă, nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

### Depozitare

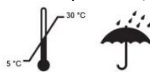

La temperatura camerei, la loc uscat.

**Producător**  
**SC TRIAMED SRL**

**Producție** Calea Buziașului nr. 77, Hall 1-C1/A | Timișoara | Timiș | România

**Sediu social** Str Cosminului nr.12 | Timișoara | Timiș | România

**Telefon** 00 40 256 48 73 88

office@triamed.ro | triamed@gmail.com | www.triamed.ro

Ediția 6, Revizia 1 /09.01.2026

## CERTIFICAT DE GARANȚIE

**Garanția legală de conformitate** conform OUG 140 din 2021 revizuită prin Legea nr.205 din 7 iulie 2023, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora: **2 ani**

Pentru a corespunde cerințelor de conformitate, bunurile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Respectă descrierea, tipul, calitatea și dețin funcționalitatea și alte caracteristici prevăzute în descrierile tehnice ale produsului (catalog, fișă tehnică sau instrucțiuni de utilizare);
2. Corespund scopului pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința vânzătorului și pe care vânzătorul l-a acceptat;
3. Sunt livrate împreună cu toate accesoriile și cu instrucțiunile de utilizare.

Vânzătorul declară că în caz de neconformitate a produsului, consumatorul are dreptul la măsuri corective, fără costuri, conform OUG nr. 140/2021.

Conform dispozițiilor legale, la achiziționarea produsului, vânzătorul are obligația de a explica modul de utilizare și întreținere a produsului furnizat. Cumpărătorul are obligația să verifice integritatea produsului, aspectul exterior și prezența în ambalaj a accesoriilor produsului înainte de finalizarea vânzării. Orice reclamație ulterioară referitoare la lipsa de conformitate din punct de vedere estetic sau de integritate exterioară și care ar fi putut fi sesizată la cumpărare nu va fi luată în considerare.

### Garanția comercială a produsului: 30 zile.

Măsurile corective în cazul defectului de fabricație sau deteriorare în garanție

Consumatorul are dreptul de a beneficia de:

1. Reparația produsului;
2. Dacă reparația nu este posibilă sau costurile implicate sunt disproporționale cu valoarea produsului, produsul este înlocuit
3. În cazul în care acțiunile corective de mai sus nu sunt posibile, se returnează clientului suma plătită la achiziționarea produsului;
4. Consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare (7 zile), fără a depăși 30 de zile calendaristice.

Acțiunile corective se efectuează fără costuri pentru cumpărător.

### Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.

În cazul în care defectul este remediat prin reparație, perioada de timp prevăzută în garanția comercială se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adus la cunoștința garantului defectul până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

În cazul în care defectul este remediat prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile defecte, perioada de timp prevăzută în garanția comercială începe să curgă de la data înlocuirii.

**Data producției:** vezi eticheta ambalaj.

**Data valabilității:** fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării.

În cazul returnării unui produs defect cumpărătorul se adresează direct vânzătorului de la care a achiziționat produsul.

Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte împreună cu produsul defect următoarele:

1. Ambalajul individual al produsului
2. Bonul fiscal sau factura primită la achiziția produsului
3. Talonul de garanție inclus în instrucțiunea de utilizare.

În cazul în care produsul a fost achiziționat direct de la producător (TRIAMED SRL), sesizările și reclamațiile se pot trimite online, pe adresa de mail: [suportclienti@triamed.ro](mailto:suportclienti@triamed.ro).

<b>TALON DE GARANȚIE</b> 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului

SR EN ISO 9001:2015  
SR EN ISO 13485:2016

