

TRIAFIX GENU JUNIOR

Orteză de genunchi fixă

Ref. SRT 332

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3
Lungimea ortezei (cm)	30	35	40
Referință	SRT332M1	SRT332M2	SRT332M3

Indicații

Se utilizează pentru imobilizarea și stabilizarea genunchiului în caz de entorse, luxații de rotulă, fractură de rotulă fără deplasare, procese inflamatorii.

Descriere

Orteza este realizată din material textil și este compusă din 3 piese care permit reglarea în lățime.

Este prevăzută cu:

- 4 atele metalice (2 lateral, 2 posterior), ce se pot modela
- 4 benzi de fixare (2 pe coapsă, 2 pe gambă).

Închiderea se face anterior cu scai.

Compoziție

Orteza este confecționată dintr-un ansamblu cașerat format din 3 straturi:

- **Velutino** - firul de poliamidă din compoziție are o rezistență mare la agenți chimici și biologici, rezistă la abraziune și nu absoarbe apa.
- **Moltopren** (MTP) – spumă poliuretanică cu celule deschise, permeabilă la aer (fluxul de aer în ambele sensuri este invers

proporțional cu densitatea spumei) și foarte mare absorbantă de umiditate.

- **Jersey cotone SOFT** - țesătură de bumbac 100% sau bumbac cu spandex - elasthan (pentru creșterea elasticității).


SOFT

Codificarea tratamentului balsamic al țesăturii din bumbac pentru a-i asigura moliciune la atingere și pentru a evita iritarea pielii.

Poziționare

Orteza se așează din spate spre față, având grijă ca rotula să fie poziționată corect, în mijlocul ortezei și să rămână liberă. Dacă este cazul se repositionează componentele laterale ale ortezei. Se fixează cele 4 benzi prevăzute cu scai, la un nivel optim de compresie, astfel încât orteza să nu alunece.

Curățare

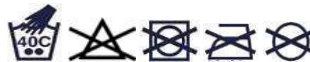

Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: **2 ani.**

Garanția comercială a produsului: 30 zile.

Data producției: vezi eticheta ambalaj.

Data valabilității: fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, indicate pe cutia de ambalare a produsului.

Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.

Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro

TALON DE GARANȚIE 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului



Producător: TRIAMED SRL

România/Timiș/Timișoara, Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A
Tel/Fax: 00 40 256 487388, Tel: 00 40 765 240037

office@triamed.ro, triamed@gmail.ro

www.triamed.ro