

THORATEX 03 JUNIOR

Orteză toracică elastică

Ref. SRT 141

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Aceste produse sunt conforme cu Specificația tehnică și cu cerințele Regulamentului (UE) MDR 2017/745 al Parlamentului European privind dispozitivele medicale și respectă cerințele prevăzute în Anexa I –Cerințe generale privind siguranța și performanța- și Anexa VIII – Reguli de clasificare. Conformitatea este declarată în baza Articolului 52(7), Anexa II și Anexa III din MDR 2017/745.

Aceste produse au certificate de înregistrare de la Ministerul Sănătății.

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3
Circumferința toracelui (cm)	45-55	55-65	65-75
Referință	SRT141M1	SRT141M2	SRT141M3

Se măsoară circumferința toracelui

Indicații

Se utilizează în caz de traumatisme sau intervenții chirurgicale la nivelul toracelui, fracturi costale, fracturi de stern, nevralgii intercostale.

Descriere

Este realizată din material textil elastic, prevăzută cu:

- 2 atele paravertebrale din material plastic pentru susținere
- 2 benzi elastice care cuprind umerii și sunt fixate pe torace, corectând prin tracțiune poziția trunchiului. Benzile sunt prevăzute cu manșoane pentru protecție axilară.

Închiderea se face anterior cu scai.

Compoziție

Material textil elastic: poliester - 50%, poliamidă - 33%, elastan - 17%, cu o structură a țesăturii ce permite o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri.

Poziționare

Se poziționează orteza pe segmentul dorsal al coloanei vertebrale și cele 2 benzi scurte se fixează anterior, pe torace. Se petrec cele 2 benzi lungi în jurul umerilor, se încrucișează la spate și se fixează anterior, pe torace.

Curățare



Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: **2 ani.**

Garanția comercială a produsului: 30 zile.

Data producției: vezi eticheta ambalaj.

Data valabilității: fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, indicate pe cutia de ambalare a produsului.

Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.

Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro

TALON DE GARANȚIE 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului



Producător: TRIAMED SRL

România/Timiș/Timișoara, Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A
Tel/Fax: 00 40 256 487388

office@triamed.ro, triamed@gmail.com

www.triamed.ro