

## AEROTEC LS PLUS

Corset lombo sacral

Ref. SRT 130

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

#### Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6
Circumferința taliei (cm)	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125
Referință	SRT130M1	SRT130M2	SRT130M3	SRT130M4	SRT130M5	SRT130M6

Se măsoară circumferința taliei

#### Indicații

Se utilizează în caz de hernii de disc incipiente, lombalgii, post intervenții chirurgicale, în caz de osteoporoză, pentru susținerea coloanei lombare.

#### Descriere

Este realizat din material textil rigid, care permite circulația aerului, prevăzut cu:

- 6 atele din material plastic pentru susținere, situate pe zona lombară
- 2 atele din material plastic pentru susținere, situate pe zona abdominală (poziționate oblic pentru a permite flexia coapsei pe abdomen)
- 2 benzi elastice de 5,5 cm, situate în jurul taliei, care asigură compresie.

Închiderea se face anterior cu scai.

Lățime: anterior 18 cm, posterior 30 cm.

Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutoare.

Cele 6 atele din material plastic stabilizează regiunea lombară reducând ușor lordoza, iar compresia pe care o exercită benzile elastice stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și durerea.

#### Compoziție

Orteza este confecționată dintr-un ansamblu cașerat format din 3 straturi:

- **Spaziato** - plasă spațializată numită și 3D datorită formei specifice, similară fagurelui de albine, firul având compoziția de poliester. Are un aspect particular permițând o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri.

• **Moltopren (MTP)** - spumă poliuretanică cu celule deschise, permeabilă la aer (fluxul de aer în ambele sensuri este invers proporțional cu densitatea spumei) și foarte mare absorbantă de umiditate.

• **Jersey cotone SOFT** - țesătură de bumbac 100% sau bumbac cu spandex - elastan (pentru creșterea elasticității).

#### SOFT

Codificarea tratamentului balsamic al țesăturii din bumbac pentru a-i asigura moliciune la atingere și pentru a evita iritarea pielii.

#### Poziționare

Lombostatul se va aplica din spate spre față, partea lată se fixează pe regiunea lombară, partea îngustă se va închide anterior, pe abdomen. Cele două benzi elastice de 5,5 cm se fixează în jurul taliei. Pentru o aplicare corectă, partea lombară este perfect întinsă, fără cute.



#### Curățare

Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

#### Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

**Garanția legală de conformitate** conform Legii nr. 449/2003: **2 ani.**

**Garanția comercială a produsului: 30 zile.**

**Data producției:** vezi eticheta ambalaj.

**Data valabilității:** fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, indicate pe cutia de ambalare a produsului.

**Termen de comunicare a soluționării:** 15 zile.

Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: [suportclienti@triamed.ro](mailto:suportclienti@triamed.ro)

<b>TALON DE GARANȚIE</b> 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului



**Producător: TRIAMED SRL**

România/Timiș/Timișoara, Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A

Tel/Fax: 00 40 256 487388, Tel: 00 40 765 240037

[office@triamed.ro](mailto:office@triamed.ro), [triamed@gmail.ro](mailto:triamed@gmail.ro)

[www.triamed.ro](http://www.triamed.ro)