

GENU REHA PO

Orteză de genunchi mobilă cu articulații reglabile

Ref. SRT 309

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6	7	8
Circumferința genunchiului (cm)	33-35	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47	47-49
Referință	SRT309M1	SRT309M2	SRT309M3	SRT309M4	SRT309M5	SRT309M6	SRT309M7	SRT309M8

Se măsoară circumferința genunchiului la mijlocul rotulei

Indicații

Se utilizează pentru reabilitare postchirurgicală și ajută la controlul flexiei și extensiei articulației genunchiului.

Descriere

Orteza este deschisă anterior, realizată din material textil și este prevăzută cu:

• 2 atele metalice cu articulație mobilă, reglabilă, câte una pe fiecare parte.

Articulațiile sunt ușor de accesat, fiind acoperite cu un capac din material plastic. Reglarea unghiului se face cu ajutorul a 2 nituri. Posibilitățile de limitare a mișcării sunt:

- flexie 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°

- extensie 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°

• 2 benzi de fixare cu scai, pe gambă

• 2 benzi de fixare cu scai, pe coapsă.

Lungime: 44 cm.

Orteza este un suport pentru articulația genunchiului, cele două articulații laterale asigurând stabilitate și siguranță la utilizare. Datorită formei sale, orteza poate fi utilizată pe un genunchi al cărui relief anatomic este deformat, având posibilitatea de reglare a compresiei prin modul de închidere anterior și prin cele 4 benzi de fixare.

Compoziție

Orteza este confecționată dintr-un ansamblu cașerat format din 3 straturi:

• **Asterix** - firul de poliamidă din compoziție are o rezistență mare la agenți chimici și biologici, rezistă la abraziune și nu absoarbe apa.

• **Moltopren (MTP)** - spumă poliuretanică cu celule deschise, permeabilă la aer (fluxul de aer în ambele sensuri este invers proporțional cu densitatea spumei) și foarte mare absorbantă de umiditate.

• **Jersey cotone SOFT** - țesătură de bumbac 100% sau bumbac cu spandex - elastan (pentru creșterea elasticității).

SOFT

Codificarea tratamentului balsamic al țesăturii din bumbac pentru a-i asigura molicieune la atingere și pentru a evita iritarea pielii.

Poziționare

Orteza se așează din spate spre față, având grijă ca rotula să fie poziționată corect, în mijlocul ortezei și să rămână liberă. Se fixează cele 4 benzi prevăzute cu scai și se reglează la nivelul optim de compresie.

Curățare



Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: **2 ani.**

Garanția comercială a produsului: 30 zile.

Data producției: vezi eticheta ambalaj.

Data valabilității: fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, indicate pe cutia de ambalare a produsului.

Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.

Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro

TALON DE GARANȚIE 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului



Producător: TRIAMED SRL

România/Timiș/Timișoara, Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A

Tel/Fax: 00 40 256 487388, Tel: 00 40 765 240037

office@triamed.ro, triamed@gmail.ro

www.triamed.ro