

## THORATEX 02

Orteză toracică rigidă

Ref. SRT 113

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed!

Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din materiale PREMIUM, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Produsele Triamed sunt înregistrate la Ministerul Sănătății și sunt conforme cu Specificația tehnică și cu cerințele Regulamentului (UE) MDR 2017/745 al Parlamentului European privind dispozitivele medicale și respectă cerințele prevăzute în Anexa I –Cerințe generale privind siguranța și performanța- și Anexa VIII – Reguli de clasificare. Conformitatea este declarată în baza Articolului 52(7), Anexa II și Anexa III din MDR 2017/745.

#### Mărimi disponibile

Mărime universală

Pentru circumferința toracelui între 75 – 135 cm.

#### Indicații

Se utilizează pentru corectarea pozițiilor vicioase ale coloanei toracale, fractură de claviculă.

#### Descriere

Este realizată din material textil moale, care nu se întinde (rigid) și nu deranjează în timpul purtării, prevăzută cu:

- o componentă posterioară care sprijină coloana toracală
- 2 benzi rigide care înconjoară umerii, corectând prin tracțiune poziția trunchiului. Cele 2 benzi se poziționează peste capul humerusului și sunt reglabile prin tăiere.

Pentru scurtarea benzilor, se îndepărtează scaiul tip "crocodil" de pe extremități, se taie banda la lungimea optimă pe semnele transversale prefigurate și se re poziționează scaiul. Suprafața mare a celor 2 benzi pe care se poate fixa scaiul permite un reglaj și o tracțiune foarte mare, ceea ce ajută la revenirea claviculei la forma anatomică în caz de fractură. Pentru a avea efect se reajustează în timpul purtării.

#### Compoziție

Materiale textile cașerate cu 2 și 3 straturi.

#### Poziționare

Se poziționează orteza pe segmentul dorsal al coloanei vertebrale, se petrec benzile în jurul umerilor, se introduc în cele 2 cataramă și se fixează anterior.

Curățare     

Se spală manual cu apă caldă, nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

#### Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.



**Producător**

**SC TRIAMED SRL**

**Producție** Calea Buziașului nr. 77, Hall 1-C1/A | Timișoara | Timiș | România

**Sediu social** Uliuc 262C | Sacoșu Turcesc | Timiș | România

**Telefon** 00 40 256 48 73 88

office@triamed.ro | triamed@gmail.com | www.triamed.ro

Ediția 4, Revizia 2 /16.10.2023

## CERTIFICAT DE GARANȚIE

**Garanția legală de conformitate** conform **OUG 140 din 2021** privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora: **2 ani**

Pentru a corespunde cerințelor de conformitate, bunurile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Respectă descrierea, tipul, calitatea și dețin funcționalitatea și alte caracteristici prevăzute în descrierile tehnice ale produsului (catalog, fișă tehnică sau instrucțiuni de utilizare);
2. Corespund scopului pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința vânzătorului și pe care vânzătorul l-a acceptat;
3. Sunt livrate împreună cu toate accesoriile și cu instrucțiunile de utilizare.

Vânzătorul declară că în caz de neconformitate a produsului, consumatorul are dreptul la măsuri corective, fără costuri, conform OUG nr. 140/2021.

Conform dispozițiilor legale, la achiziționarea produsului, vânzătorul are obligația de a explica modul de utilizare și întreținere a produsului furnizat. Cumpărătorul are obligația să verifice integritatea produsului, aspectul exterior și prezența în ambalaj a accesoriilor produsului înainte de finalizarea vânzării. Orice reclamație ulterioară referitoare la lipsa de conformitate din punct de vedere estetic sau de integritate exterioară și care ar fi putut fi sesizată la cumpărare nu va fi luată în considerare.

### **Garanția comercială a produsului: 30 zile.**

Măsurile corective în cazul defectului de fabricație sau deteriorare în garanție

Consumatorul are dreptul de a beneficia de:

1. Reparația produsului;
2. Dacă reparația nu este posibilă sau costurile implicate sunt disproporționale cu valoarea produsului, produsul este înlocuit
3. În cazul în care acțiunile corective de mai sus nu sunt posibile, se returnează clientului suma plătită la achiziționarea produsului.

Acțiunile corective se efectuează fără costuri pentru cumpărător.

### **Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.**

În cazul în care defectul este remediat prin reparație, perioada de timp prevăzută în garanția comercială se prelungeste cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adus la cunoștința garantului defectul până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

În cazul în care defectul este remediat prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile defecte, perioada de timp prevăzută în garanția comercială începe să curgă de la data înlocuirii.

**Data producției:** vezi eticheta ambalaj.

**Data valabilității:** fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării.

În cazul returnării unui produs defect cumpărătorul se adresează direct vânzătorului de la care a achiziționat produsul.

Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte împreună cu produsul defect următoarele:

1. Ambalajul individual al produsului
2. Bonul fiscal sau factura primită la achiziția produsului
3. Talonul de garanție inclus în instrucțiunea de utilizare.

În cazul în care produsul a fost achiziționat direct de la producător (TRIAMED SRL), sesizările și reclamațiile se pot trimite online, pe adresa de mail: [supportclienti@triamed.ro](mailto:supportclienti@triamed.ro).

<b>TALON DE GARANȚIE</b> 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului

 **Producător**  
**SC TRIAMED SRL**

**Producție** Calea Buziașului nr. 77, Hall 1-C1/A | Timișoara | Timiș | România

**Sediu social** Uliuc 262C | Sacoșu Turcesc | Timiș | România

**Telefon** 00 40 256 48 73 88

office@triamed.ro | triamed@gmail.com | www.triamed.ro

Ediția 4, Revizia 2 /16.10.2023