

PATELLAFIX 02

Orteză de genunchi mobilă pentru tendon patelar

Ref. SRT 306

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6	7	8
Circumferința genunchiului (cm)	33-35	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47	47-49
Referință	SRT306M1	SRT306M2	SRT306M3	SRT306M4	SRT306M5	SRT306M6	SRT306M7	SRT306M8

Se măsoară circumferința genunchiului la mijlocul rotulei

Indicații

Se utilizează pentru reducerea disconfortului și inflamațiilor, tendinopatie patelară.

Descriere

Orteză tip manșon (deschisă anterior la nivel patelar), realizată din material textil, prevăzută cu:

- o pelotă ce exercită compresie la nivelul tendonului rotulian (spumă polietilenă)

- o bandă de fixare.

Lungime: 20 cm.

Orteza este un suport pentru articulația genunchiului. Datorită benzii de fixare cu cataramă, poate fi reglată la compresia optimă, putând fi utilizată în activități sportive care suprasolicite articulația genunchiului și tendonul patelar.

Compoziție

Neopren acoperit pe ambele părți cu material textil, poliester 100%.

Poziționare

Se așează orteza pe genunchi având grijă ca rotula să fie poziționată corect, în mijlocul ortezei și să rămână liberă. Se fixează cele 2 benzi prevăzute cu scai și se reglează la nivelul optim de compresie.

Curățare



Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: **2 ani.**

Garanția comercială a produsului: 30 zile.

Data producției: vezi eticheta ambalaj.

Data valabilității: fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, indicate pe cutia de ambalare a produsului.

Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.

Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro

TALON DE GARANȚIE 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului



Producător: TRIAMED SRL

România/Timiș/Timișoara, Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A
Tel/Fax: 00 40 256 487388, Tel: 00 40 765 240037

office@triamed.ro, triamed@gmail.com

www.triamed.ro