

TRIASAB

Orteză pentru abducție a brațului la 45°/60°

Ref. SRT 221

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed!

Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din materiale PREMIUM, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Produsele Triamed sunt înregistrate la Ministerul Sănătății și sunt conforme cu Specificația tehnică și cu cerințele Regulamentului (UE) MDR 2017/745 al Parlamentului European privind dispozitivele medicale și respectă cerințele prevăzute în Anexa I –Cerințe generale privind siguranța și performanța- și Anexa VIII – Reguli de clasificare. Conformitatea este declarată în baza Articolului 52(7), Anexa II și Anexa III din MDR 2017/745.

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3
Circumferința toracelui și brațului (cm)	85-105	105-125	125-145
Lungime antebrăț și mână, până la baza degetelor (cm)	36	39	43
Referință	SRT221M1	SRT221M2	SRT221M3

Se măsoară circumferința toracelui și brațului

Indicații

Se recomandă în chirurgia plastică și reparatorie, ortopedie, postoperator, după traumatisme ale umărului și brațului, fracturi la nivelul articulației scapulohumerale.

Descriere

Orteza este confecționată din 3 componente:

- pernă de susținere a brațului, din spumă poliuretanică (burete), acoperită cu material textil, prevăzută cu două înclinații: 45° și 60°. Fixarea pernei de abducție la nivelul

abdomenului se face cu o centură de poziționare prevăzută cu 2 cataramă duble Lock pentru reglaj

- componentă de fixare a antebrățului, din spumă poliuretanică (burete)

- ham de susținere a ortezei pe torace, compus din 4 benzi reglabile prin tăiere și repoziționarea scaiului tip "crocodil", prevăzut cu 2 inele și 2 manșoane de protecție.

Orteza are posibilitatea de fixare în abducție a brațului la 45° sau 60° față de torace, prin modificarea poziției pernei de susținere.

Se poate utiliza atât pe stânga cât și pe dreapta.

Închiderea se face cu scai.

Compoziție

Orteza este confecționată din spumă poliuretanică (burete) acoperită cu material textil: poliamidă - 100%.


Materialul textil rigid compus din poliamidă are o rezistență mare la agenți chimici și biologici, rezistă la abraziune și nu absoarbe apa.

Poziționare

Se fixează buretele triunghiular între torace și braț, astfel încât unghiul de abducție a brațului să corespundă indicațiilor medicului specialist. Hamul de fixare se va sprijini cu partea centrală pe stern, părțile lungi ale hamului se petrec unul peste umărul sănătos, celălalt subaxilar și vor înconjura spatul, fixându-se pe partea posterioară a buretelui triunghiular. Se fixează la lungimea optimă prin tăierea benzilor și repoziționarea scaiului tip "crocodil".

Părțile scurte ale hamului se fixează pe partea anterioară a buretelui triunghiular. Buretele pentru antebrăț se fixează de cel triunghiular, în așa fel încât să permită sprijinirea antebrățului și a palmei pe burete.

Curățare

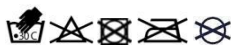

Se spală manual cu apă caldă, nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

Producător

SC TRIAMED SRL

Producție Calea Buziașului nr. 77, Hall 1-C1/A | Timișoara | Timiș | România

Sediu social Uliuc 262C | Sacoșu Turcesc | Timiș | România

Telefon 00 40 256 48 73 88

office@triamed.ro | triamed@gmail.com | www.triamed.ro

Ediția 4, Revizia 1 /15.05.2023

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Garanția legală de conformitate conform **OUG 140 din 2021** privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora: **2 ani**

Pentru a corespunde cerințelor de conformitate, bunurile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Respectă descrierea, tipul, calitatea și dețin funcționalitatea și alte caracteristici prevăzute în descrierile tehnice ale produsului (catalog, fișă tehnică sau instrucțiuni de utilizare);
2. Corespund scopului pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința vânzătorului și pe care vânzătorul l-a acceptat;
3. Sunt livrate împreună cu toate accesoriile și cu instrucțiunile de utilizare.

Vânzătorul declară că în caz de neconformitate a produsului, consumatorul are dreptul la măsuri corective, fără costuri, conform OUG nr. 140/2021.

Conform dispozițiilor legale, la achiziționarea produsului, vânzătorul are obligația de a explica modul de utilizare și întreținere a produsului furnizat. Cumpărătorul are obligația să verifice integritatea produsului, aspectul exterior și prezența în ambalaj a accesoriilor produsului înainte de finalizarea vânzării. Orice reclamație ulterioară referitoare la lipsa de conformitate din punct de vedere estetic sau de integritate exterioară și care ar fi putut fi sesizată la cumpărare nu va fi luată în considerare.

Garanția comercială a produsului: 30 zile.

Măsurile corective în cazul defectului de fabricație sau deteriorare în garanție

Consumatorul are dreptul de a beneficia de:

1. Reparația produsului;
2. Dacă reparația nu este posibilă sau costurile implicate sunt disproporționale cu valoarea produsului, produsul este înlocuit
3. În cazul în care acțiunile corective de mai sus nu sunt posibile, se returnează clientului suma plătită la achiziționarea produsului.

Acțiunile corective se efectuează fără costuri pentru cumpărător.

Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.

În cazul în care defectul este remediat prin reparație, perioada de timp prevăzută în garanția comercială se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adus la cunoștința garantului defectul până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

În cazul în care defectul este remediat prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile defecte, perioada de timp prevăzută în garanția comercială începe să curgă de la data înlocuirii.

Data producției: vezi eticheta ambalaj.

Data valabilității: fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării.

În cazul returnării unui produs defect cumpărătorul se adresează direct vânzătorului de la care a achiziționat produsul.

Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte împreună cu produsul defect următoarele:

1. Ambalajul individual al produsului
2. Bonul fiscal sau factura primită la achiziția produsului
3. Talonul de garanție inclus în instrucțiunea de utilizare.

În cazul în care produsul a fost achiziționat direct de la producător (TRIAMED SRL), sesizările și reclamațiile se pot trimite online, pe adresa de mail: supportclienti@triamed.ro.

TALON DE GARANȚIE 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului



Producător

SC TRIAMED SRL

Producție Calea Buziașului nr. 77, Hall 1-C1/A | Timișoara | Timiș | România

Sediu social Uliuc 262C | Sacoșu Turcesc | Timiș | România

Telefon 00 40 256 48 73 88

office@triamed.ro | triamed@gmail.com | www.triamed.ro

Ediția 4, Revizia 1 /15.05.2023