



STOMATEX

Corset abdominal pentru stoma

Ref. SRT 106

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed!

Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din materiale PREMIUM, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Produsele Triamed sunt înregistrate la Ministerul Sănătății și sunt conforme cu Specificația tehnică și cu cerințele Regulamentului (UE) MDR 2017/745 al Parlamentului European privind dispozitivele medicale și respectă cerințele prevăzute în Anexa I –Cerințe generale privind siguranța și performanța- și Anexa VIII – Reguli de clasificare. Conformitatea este declarată în baza Articolului 52(7), Anexa II și Anexa III din MDR 2017/745.

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6
Circumferința taliei (cm)	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125
Referință	SRT106M1	SRT106M2	SRT106M3	SRT106M4	SRT106M5	SRT106M6

Se măsoară circumferința taliei

Indicații

Se utilizează după intervenții chirurgicale la nivel abdominal, în cazul persoanelor cu colostome/urostome.

Descriere

Este realizat din material textil elastic și material textil rigid.

Componenta anterioară rigidă este prevăzută cu un decupaj pentru sacul de colostomie, realizat dintr-un inel de polietilenă de 25 mm lățime și diametru interior de 75 mm.

Închiderea se face anterior cu scai.

Lățime: 27,5 cm.

Partea rigidă anterioară conferă suport și susținere abdomenului.

Este un corset tradițional semirigid care, datorită componentei posterioare elastice, permite o respirație toracoabdominală normală.

Compoziție


Material textil elastic: poliester - 50%, poliamidă - 33%, elastan - 17%, cu o structură a țesăturii ce permite o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri.

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.

Poziționare

Orteza se aplică din spate spre față. Sacul de colostomie se introduce cu grijă prin orificiul special, apoi corsetul se închide anterior, cu scai.

Curățare

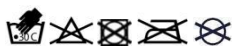

Se spală manual cu apă caldă, nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.



Producător

SC TRIAMED SRL

Productie Calea Buziașului nr. 77, Hall 1-C1/A | Timișoara | Timiș | România

Sediu social Uliuc 262C | Sacoșu Turcesc | Timiș | România

Telefon 00 40 256 48 73 88

office@triamed.ro | triamed@gmail.com | www.triamed.ro

Ediția 4, Revizia 1 /09.05.2023



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Garanția legală de conformitate conform **OUG 140 din 2021** privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora: **2 ani**

Pentru a corespunde cerințelor de conformitate, bunurile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Respectă descrierea, tipul, calitatea și dețin funcționalitatea și alte caracteristici prevăzute în descrierile tehnice ale produsului (catalog, fișă tehnică sau instrucțiuni de utilizare);
2. Corespund scopului pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința vânzătorului și pe care vânzătorul l-a acceptat;
3. Sunt livrate împreună cu toate accesoriile și cu instrucțiunile de utilizare.

Vânzătorul declară că în caz de neconformitate a produsului, consumatorul are dreptul la măsuri corective, fără costuri, conform OUG nr. 140/2021.

Conform dispozițiilor legale, la achiziționarea produsului, vânzătorul are obligația de a explica modul de utilizare și întreținere a produsului furnizat. Cumpărătorul are obligația să verifice integritatea produsului, aspectul exterior și prezența în ambalaj a accesoriilor produsului înainte de finalizarea vânzării. Orice reclamație ulterioară referitoare la lipsa de conformitate din punct de vedere estetic sau de integritate exterioară și care ar fi putut fi sesizată la cumpărare nu va fi luată în considerare.

Garanția comercială a produsului: 30 zile.

Măsurile corective în cazul defectului de fabricație sau deteriorare în garanție

Consumatorul are dreptul de a beneficia de:

1. Reparația produsului;
2. Dacă reparația nu este posibilă sau costurile implicate sunt disproporționale cu valoarea produsului, produsul este înlocuit
3. În cazul în care acțiunile corective de mai sus nu sunt posibile, se returnează clientului suma plătită la achiziționarea produsului.

Acțiunile corective se efectuează fără costuri pentru cumpărător.

Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.

În cazul în care defectul este remediat prin reparație, perioada de timp prevăzută în garanția comercială se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adus la cunoștința garantului defectul până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

În cazul în care defectul este remediat prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile defecte, perioada de timp prevăzută în garanția comercială începe să curgă de la data înlocuirii.

Data producției: vezi eticheta ambalaj.

Data valabilității: fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării.

În cazul returnării unui produs defect cumpărătorul se adresează direct vânzătorului de la care a achiziționat produsul.

Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte împreună cu produsul defect următoarele:

1. Ambalajul individual al produsului
2. Bonul fiscal sau factura primită la achiziția produsului
3. Talonul de garanție inclus în instrucțiunea de utilizare.

În cazul în care produsul a fost achiziționat direct de la producător (TRIAMED SRL), sesizările și reclamațiile se pot trimite online, pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro.

TALON DE GARANȚIE 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului



Producător

SC TRIAMED SRL

Producție Calea Buziașului nr. 77, Hall 1-C1/A | Timișoara | Timiș | România

Sediu social Uliuc 262C | Sacoșu Turcesc | Timiș | România

Telefon 00 40 256 48 73 88

office@triamed.ro | triamed@gmail.com | www.triamed.ro

Ediția 4, Revizia 1 /09.05.2023