

TRIAGEN PLUS

Orteză de genunchi mobilă cu articulații laterale

Ref. SRT 343

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6	7	8
Circumferința genunchiului (cm)	33-35	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47	47-49
Referință	SRT343M1	SRT343M2	SRT343M3	SRT343M4	SRT343M5	SRT343M6	SRT343M7	SRT343M8

Se măsoară circumferința genunchiului la mijlocul rotulei

Indicații

Se utilizează în caz de instabilitate laterală a articulației genunchiului, traumatisme și leziuni la nivelul articulației genunchiului, procese inflamatorii, recuperare postoperatorie.

Descriere

Orteză realizată din material textil, tubulară în partea inferioară și deschisă anterior în partea superioară, prevăzută cu:

- 2 atele metalice cu articulație mobilă, reglabilă, câte una pe fiecare parte. Articulațiile sunt ușor de accesat, fiind acoperite cu un capac din material plastic. Reglarea unghiului se face cu ajutorul a 2 nituri.

Posibilitățile de limitare a mișcării sunt:

- flexie 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°

- extensie 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°

- 2 benzi de fixare din scai elastic. Scaiul elastic se mulează pe anatomia conică a coapsei, împiedicând alunecarea ortezei.

Închiderea se face anterior cu scai. Lungime: 33 cm.

Datorită formei sale, orteza poate fi utilizată pe un genunchi al cărui relief anatomic este deformat, având posibilitatea de reglare a

compresiei prin modul de închidere anterior și prin cele 2 benzi de fixare.

Compoziție

Neopren acoperit pe ambele părți cu material textil, poliester 100%.

Poziționare

Orteza se așează pe genunchi având grijă ca rotula să fie poziționată corect, în mijlocul ortezei și să rămână liberă. Se fixează cele 2 benzi prevăzute cu scai elastic și se reglează la nivelul optim de compresie.

Curățare



Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: **2 ani.**

Garanția comercială a produsului: 30 zile.

Data producției: vezi eticheta ambalaj.

Data valabilității: fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, indicate pe cutia de ambalare a produsului.

Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.

Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro

TALON DE GARANȚIE 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului



Producător: TRIAMED SRL

România/Timiș/Timișoara, Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A

Tel/Fax: 00 40 256 487388, Tel: 00 40 765 240037

office@triamed.ro, triamed@gmail.ro

www.triamed.ro