

SHORT REGULAR WALKER STANDARD LINER

Orteză de gleznă fixă



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed!

Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din materiale PREMIUM, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Produsele Triamed sunt înregistrate la Ministerul Sănătății și sunt conforme cu Specificația tehnică și cu cerințele Regulamentului (UE) MDR 2017/745 al Parlamentului European privind dispozitivele medicale și respectă cerințele prevăzute în Anexa I –Cerințe generale privind siguranța și performanța-și Anexa VIII – Reguli de clasificare. Conformitatea este declarată în baza Articolului 52(7), Anexa II și Anexa III din MDR 2017/745.

Mărimi disponibile

Mărimi	Small	Medium	Large	X-Large
Număr încălțăminte	36 – 39	39 – 43	43 - 46	+46
Înălțime interioară (cm)	31	32	33	33
Referință	12-0016-S	12-0016-M	12-0016-L	12-0016-XL

Indicații

Se utilizează în entorse, traumatisme ale țesuturilor moi ale piciorului și gambei, fracturi stabile și traumatisme ale piciorului și gleznei, afecțiuni ale tendonului lui Achile, recuperare postoperatorie.

Contraindicații

Nu este recomandată în fracturi instabile sau fracturi proximale ale tibiei și peroneului.

Precauții și atenționări

Acest dispozitiv se prescrie de către personal medical calificat, care stabilește frecvența și durata utilizării.

A nu se strânge prea tare benzile de fixare cu scai. Acest lucru poate compromite circulația sanguină și poate cauza iritații ale pielii, în special în cazul persoanelor cu neuropatie diabetică.

Se recomandă atenție sporită la mersul pe suprafețe ude sau alunecoase, pentru a evita accidentarea.

Descriere

Orteza este realizată din 2 componente:

- componentă din plastic, rigidă, prevăzută cu două atele metalice și căptușită cu spumă poliuretanică de densitate medie
- componentă din material textil, cu rol de protecție.

Pentru fixare orteza este prevăzută cu:

- o bandă cu scai la nivelul piciorului
- 2 benzi cu scai la nivelul gambei.

Atelele laterale metalice sunt prevăzute cu huse de polietilenă care se îndepărtează după fixarea piciorului cu componenta textilă în orteză. Rolul huselor este de a facilita poziționarea, fără agățarea scaiului pe suprafața componentei textile. După poziționare husele se scot și se fixează benzile cu scai.

Compoziție

Polyester, PU Foam, EVA, Nylon, Fibreglass.

Poziționare


Se fixează prima dată componenta textilă pe picior după care se poziționează componenta rigidă. Se fixează benzile prevăzute cu scai și se reglează la nivelul optim de compresie.

Curățare



Se spală manual cu apă caldă, nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare

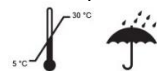

La temperatura camerei, la loc uscat.

Producător ORTHOBROKER BV

Distribuitor SC TRIAMED SRL

Producție Calea Buziașului nr. 77, Hall 1-C1/A | Timișoara | Timiș | România

Sediu social Str. Cosminului nr.12 | Timișoara | Timiș | România

Telefon 00 40 256 487388

office@triamed.ro | triamed@gmail.com | www.triamed.ro

Ediția 2, Revizia 2 /13.03.2026

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Garanția legală de conformitate conform **OUG 140 din 2021** revizuită prin Legea nr.205 din 7 iulie 2023, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora: **2 ani**

Pentru a corespunde cerințelor de conformitate, bunurile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Respectă descrierea, tipul, calitatea și dețin funcționalitatea și alte caracteristici prevăzute în descrierile tehnice ale produsului (catalog, fișă tehnică sau instrucțiuni de utilizare);
2. Corespund scopului pentru care consumatorul le solicită, pe care consumatorul l-a adus la cunoștința vânzătorului și pe care vânzătorul l-a acceptat;
3. Sunt livrate împreună cu toate accesoriile și cu instrucțiunile de utilizare.

Vânzătorul declară că în caz de neconformitate a produsului, consumatorul are dreptul la măsuri corective, fără costuri, conform OUG nr. 140/2021. Conform dispozițiilor legale, la achiziționarea produsului, vânzătorul are obligația de a explica modul de utilizare și întreținere a produsului furnizat. Cumpărătorul are obligația să verifice integritatea produsului, aspectul exterior și prezența în ambalaj a accesoriilor produsului înainte de finalizarea vânzării. Orice reclamație ulterioară referitoare la lipsa de conformitate din punct de vedere estetic sau de integritate exterioară și care ar fi putut fi sesizată la cumpărare nu va fi luată în considerare.

Garanția comercială a produsului: 30 zile.

Măsurile corective în cazul defectului de fabricație sau deteriorare în garanție

Consumatorul are dreptul de a beneficia de:

1. Reparația produsului;
2. Dacă reparația nu este posibilă sau costurile implicate sunt disproporționale cu valoarea produsului, produsul este înlocuit
3. În cazul în care acțiunile corective de mai sus nu sunt posibile, se returnează clientului suma plătită la achiziționarea produsului;
4. Consumatorii beneficiază de înlocuirea bunurilor în cazul în care neconformitatea acestora este constatată la scurt timp după livrare (7 zile), fără a depăși 30 de zile calendaristice.

Acțiunile corective se efectuează fără costuri pentru cumpărător.

Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.

În cazul în care defectul este remediat prin reparație, perioada de timp prevăzută în garanția comercială se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adus la cunoștința garantului defectul până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

În cazul în care defectul este remediat prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile defecte, perioada de timp prevăzută în garanția comercială începe să curgă de la data înlocuirii.

Data producției: vezi eticheta ambalaj.

Data valabilității: fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării.

În cazul returnării unui produs defect cumpărătorul se adresează direct vânzătorului de la care a achiziționat produsul.

Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte împreună cu produsul defect următoarele:

1. Ambalajul individual al produsului
2. Bonul fiscal sau factura primită la achiziția produsului
3. Talonul de garanție inclus în instrucțiunea de utilizare.

În cazul în care produsul a fost achiziționat direct de la producător (TRIAMED SRL), sesizările și reclamațiile se pot trimite online, pe adresa de mail: supportclienti@triamed.ro.

TALON DE GARANȚIE 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului

 **Producător ORTHOBROKER BV**

Distribuitor SC TRIAMED SRL

Producție Calea Buziașului nr. 77, Hall 1-C1/A | Timișoara | Timiș | România

Sediu social Str. Cosminului nr.12 | Timișoara | Timiș | România

Telefon 00 40 256 487388

office@triamed.ro | triamed@gmail.com | www.triamed.ro

Ediția 2, Revizia 2 /13.03.2026