

TRIAMED

CALF FLEX

Orteză de gambă

Ref. SRT 315

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Mărimi disponibile

| Mărimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Circumferința gambei în 1/3 proximală (cm) | 29-32 | 32-35 | 35-38 | 38-42 | 42-48 |
| Referință | SRT315M1 | SRT315M2 | SRT315M3 | SRT315M4 | SRT315M5 |

Se măsoară circumferința gambei în 1/3 proximală

Indicații

Se utilizează în caz de leziuni ale musculaturii gambei, traumatisme sportive.

Descriere

Orteză tip manșon, realizată din material textil. Închiderea se face anterior cu scai.

Lungime: 24 cm.

Compoziție

Neopren acoperit pe ambele părți cu material textil, poliester 100%.

Poziționare

Se așează orteza pe gambă și se fixează cu scai.



Curățare

Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: **2 ani.**

Garanția comercială a produsului: 30 zile.

Data producției: vezi eticheta ambalaj.

Data valabilității: fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, indicate pe cutia de ambalare a produsului.

Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.

Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro

| | |
|--|------------------------------------|
| TALON DE GARANȚIE 30 zile de la data cumpărării produsului | Lotul și data fabricației: |
| Referința produsului: | Data cumpărării: |
| Motivul sesizării/reclamației: | Semnătura și ștampila vânzătorului |



Producător: TRIAMED SRL

România/Timiș/Timișoara, Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A

Tel/Fax: 00 40 256 487388, Tel: 00 40 765 240037

office@triamed.ro, triamed@gmail.ro

www.triamed.ro