

TRIAMED

CERVITEX

Orteză cervicală moale

Cod: SRT 104

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Mărimi disponibile în 3 variante de înălțime: 6, 8 și 10 cm

Mărimi	1	2	3	4
Circumferința gâtului (cm)	29-35	35-41	41-47	47-53
Cod	SRT104M1H	SRT104M2H	SRT104M3H	SRT104M4H

După codul produsului se adaugă înălțimea în cm: 6, 8 sau 10

Se măsoară circumferința gâtului

Indicații

Se utilizează în caz de artroze cervicale, torticolis, entorse ușoare, după intervenții chirurgicale la nivelul coloanei cervicale.

Descriere

Orteza este realizată din spumă poliuretanică (burete) de 3 cm grosime, acoperită cu o husă din bumbac. Are formă anatomică, asigurând o potrivire optimă și un confort sporit la purtare.

Închiderea se face posterior cu scai.

Datorită formei anatomice și densității spumei din care este confecționată, orteza cervicală moale limitează mișcările de flexie și extensie ale coloanei cervicale. Oferă astfel suport pentru coloana cervicală, ajutând la procesul de vindecare.

Compoziție

Spumă poliuretanică - burete.

Material textil moale (husă) – bumbac 100%.

Poziționare

Gulerul se așează sub bărbie, astfel încât bărbia să se sprijine confortabil în adâncitura gulerului și se fixează în spate cu ajutorul scaiului.

Curățare



Se spală manual cu apă caldă, nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

TALON DE GARANȚIE	
30 zile de la data cumpărării produsului.	
Codul produsului	
Data cumpărării	
Semnătura și ștampila vânzătorului	

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Producător: TRIAMED SRL

Sediul social

Comuna Sacoșu Turcesc, sat Uliuc, nr.262 C, Timiș / România

Tel/Fax: 00 40 256 487388

office@triamed.ro

www.triamed.ro

Producție

Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A, Timișoara /Timiș/ România

Tel: 00 40 765 240037

triamed@gmail.ro

