

SINTEX JUNIOR

Support fixare braț

Ref. SRT 224

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Dragă utilizatorule!

Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3
Lungimea antebrăului (cm)	16-18	18-20	20-22
Referință	SRT224M1	SRT224M2	SRT224M3

Se măsoară lungimea antebrăului

Indicații

Se utilizează pentru susținerea brațului și antebrăului.

Descriere

Orteză realizată din material textil, formată dintr-o singură componentă care susține brațul.

Prevăzută cu 2 benzi de susținere reglabile. Închiderea se face cu scai. Orteza este un suport eficient pentru braț și antebră. Datorită celor 2 benzi de fixare, nu permite abducția brațului și rotația externă.

Compoziție

Orteza este confecționată dintr-un material textil rigid, poliester 100%.

- **Spaziato** - plasă spațializată numită și 3D datorită formei specifice, similară fagurelui de albine, firul având compoziția de poliester. Are un aspect particular, permițând o permeabilitate a aerului foarte mare în ambele sensuri.

Benzile de susținere sunt confecționate dintr-un ansamblu cașerat format din 3 straturi:

- **Velutino** - firul de poliamidă din compoziție are o rezistență mare la agenți chimici și biologici, rezistă la abraziune și nu absoarbe apa.

- **Moltopren (MTP)** – spumă poliuretanică cu celule deschise, permeabilă la aer (fluxul de aer în ambele sensuri este invers proporțional cu densitatea spumei) și foarte mare absorbantă de umiditate.

- **Jersey cotone SOFT** - țesătură de bumbac 100% sau bumbac cu spandex - elasthan (pentru creșterea elasticității).


SOFT

Codificarea tratamentului balsamic al țesăturii din bumbac pentru a-i asigura moliuene la atingere și pentru a evita iritarea pielii.

Poziționare

Se așează brațul în unghi de 90° în suport și se fixează benzile la înălțimea dorită.

Curățare

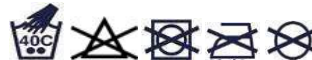

Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albește, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!

Depozitare

La temperatura camerei, la loc uscat și bine ventilat.

Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: **2 ani.**

Garanția comercială a produsului: 30 zile.

Data producției: vezi eticheta ambalaj.

Data valabilității: fără termen de expirare.

Pentru validarea garanției, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze și să prezinte Talonul de garanție.

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, indicate pe cutia de ambalare a produsului.

Termen de comunicare a soluționării: 15 zile.

Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro

TALON DE GARANȚIE 30 zile de la data cumpărării produsului	Lotul și data fabricației:
Referința produsului:	Data cumpărării:
Motivul sesizării/reclamației:	Semnătura și ștampila vânzătorului



Producător: TRIAMED SRL

România/Timiș/Timișoara, Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A

Tel/Fax: 00 40 256 487388, Tel: 00 40 765 240037

office@triamed.ro, triamed@gmail.ro

www.triamed.ro